


★新商品★

たんたんめーたー 舌筋力測定器



たんたんめーたーできること

- ☑ 「舌の筋力」を数値で評価
- ☑ 「舌の機能」をチェック

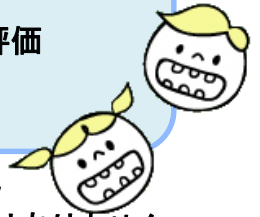

※保険の算定はできません
※トレーニング用の器具ではありません

使用目的

食べ物がうまく飲み込めない、食べ物がのどにつかえる感じがする、口が閉じてなく舌が下がっている、口で呼吸しているようなことがある場合は、舌の機能がたりない可能性があります。舌がどのように機能しているかを目で見ることはできませんので、「たんたんめーたー」を使用して舌の筋力を数値で測定します。

使用方法

1. 測定器本体の目盛りを0に指で設定します。必ず毎回測定する前に指で目盛りを0に戻してください。
2. 本体はまっすぐ持ち、スプーンの曲面を軽く舌の上のせでコボコ面に上の前歯を軽く置きます。口は開けたまま舌だけの力でスプーンの A から B の部分をゆっくりと押し上げ、つらいところで押し上げるのをやめます。
3. 測定器本体の目盛りの位置が舌筋力の値です。3回測定して真ん中数値を記録帳に記入します。



基準値

年齢とともに舌などの筋力は落ちていきます。正常値として2.0kg前後を目安にしてください。

関連製品

製品のカバーとしておすすめです！

ディスポーザブルで患者様ごとに交換でき衛生的です。



たんたんめーたーがぴったり入ります！

ディクシー衛生カバー II

【お取り扱い先】株式会社ジーシー

■仕様65×220mm

包装	価格
1函 300枚入り	¥12,800

※株式会社ジーシー様と機械製品の取引のある歯科材料販売業者よりご購入頂けます。出入りの歯科材料販売業者等にお問い合わせくださいませ。