

受け口ってなに？

上下前歯のかみ合わせが反対です。



顔の成長は6歳までに約80%が完了します。

顔の成長を考えると、

成長過程での早期治療が大切です。

良い顔に育成させましょう！



管理医療機器 歯列矯正用咬合誘導装置

パナシールドプラスMedicalは、顎の正しい成長を促すマウスピース型矯正装置です。



素材：エラストマー

本製品のご使用にあたっては、

- 必ず歯科医師の指導に従ってください。
- 保護者の管理の下で使用してください。
- 安全性試験済み



Oral Academy

製造販売元
有限会社オーラルアカデミー
東京都中野区沼袋3-30-15

TEL 03-5380-2336 HP <https://oral-academy.com/>

3歳からはじめられる！



お子さんの歯こうなっていませんか？

受け口 かみ合わせが反対

受け口・早期治療には

パナシールドプラス Medical

パナシールドプラスMedicalって、なに？

顎の正しい成長を促すマウスピース型矯正装置です。

年齢はいつから使用できる？

目安としては3歳頃から使用できます。
早期の治療をお勧めしています。

装置の特徴

パナシールドプラスMedicalは、やわらかい素材を使っているため、口の中に入れた際の痛みや違和感が少なく、装着感の良い仕様になっています。

おうちの中への入れ方

舌を受け皿の上にのせ、マウスピースを口の中に入れて閉じます。鼻で呼吸ができない、装置があたって痛いなどがある場合は、歯科医師に相談しましょう。



舌を受け皿上にのせる

お口に入れる

使用方法は？

●慣れないうちは日中に使用して1時間・2時間と少しずつ口の中に入れる時間を延ばしていきます。
慣れてから寝ている間に使用して下さい。

●寝ている間に口が開いていても大丈夫です。

●お子さんの口から装置がはみ出てしまったら、口の中に戻してあげて下さい。慣れると朝まで装着できるようになります。

●一週間程度は様子を見るようにしてください。



装置の効果は？



治療前

治療後


受け口のお子さんにはこんな特徴があります

舌が下がっている

上唇の圧力が強い



マウスピースで改善します

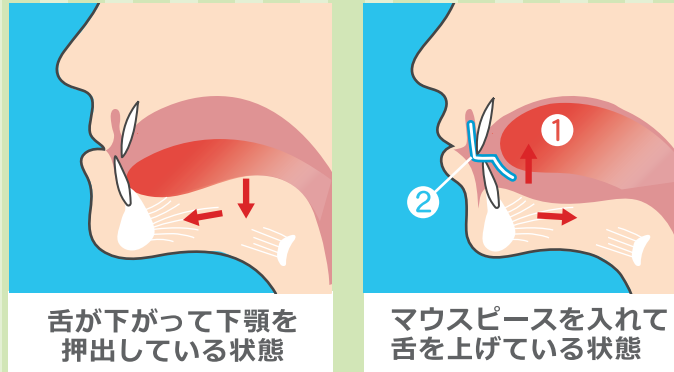

舌が下がって下顎を押し出している状態

マウスピースを入れて舌を上げている状態

① マウスピースで舌を持ち上げることで、舌が下がって前に押し出していた下顎への圧を取り除きます。

② 上唇の押さえる力をマウスピースで弱めることで、上顎の成長を促します。

お手入れ方法



①
マウスピースを外したらぬめりを取りながら流水で良くすすいで洗ってください



②
水気をとり専用のケースに入れて保管して下さい