

キャリアフレンド1

インスツルメント 7種 / 保持板 1個付き

使用目的


歯牙へブラケットを接着する際、各歯牙の定位置につける為のツールです





7種類(写真上から)

- 臼歯部用2本 4.0mm 赤
- 4.5mm 青
- フリー(ガイドなし)1本 緑
- スタンダード4本 3.5mm 黄
- 4.0mm ピンク
- 4.5mm 水色
- 5.0mm 黒

保持板:キャリアフレンド1でブラケットを保持する際に使用

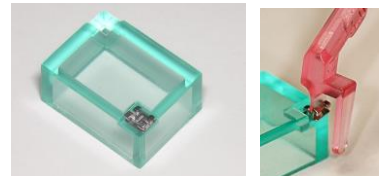

※0.022規格のブラケットには、キャリアフレンドの保持部に歯磨剤等を付けることで保持できます。

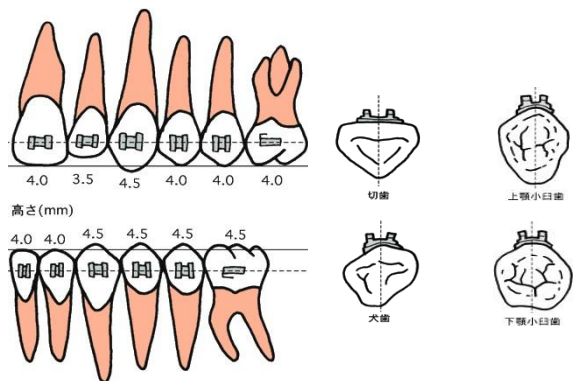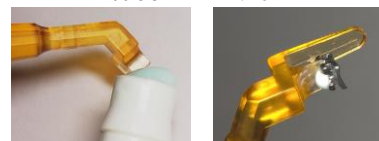


参考:各歯牙のブラケット設置部位

特徴-

◆スタンダードの構造



◆臼歯チューブ用の構造

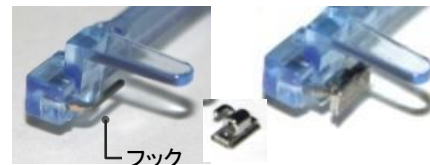

使用方法 [光重合型セメント材を用いる場合]

1. 歯面清掃・防湿
2. エッチング・水洗
3. ボンディング
4. キャリアフレンドでブラケットを保持
ブラケットを保持板に乗せ、キャリアフレンド保持部をブラケットの
スロットにはめる
5. ブラケット接着への接着材塗布
6. ブラケットを歯面へ圧接
キャリアフレンドのガイドを先端に合わせて、ブラケットを歯面へ圧接する
7. 光照射、余剰接着材の除去

※一人で操作する場合には、照射器を左手で持つと楽にブラケットを付けることができます。

