


模型保管箱



記入例

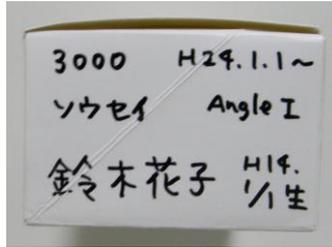

サイズ : 50 × 75 × 150mm

患者さんの石膏模型は、治療結果を診査したり患者さんやその保護者へ治療の成果を示すのに効果的ですが、破損しやすく場所をとります。

模型を入れるのに適したサイズの紙箱に入れれば、破損を防ぎかつ積み上げて保管できます。小児の小さい石膏模型なら3対、永久歯列の大きい石膏模型なら2対程度入ります。

「床矯正日記」の使い方

使用目的

パナチェッカーで測定した数値を患者さん自らグラフ化して、目標の時期に拡大を終わらせることを目指します。

特徴


平成25年9月にためしてガッテンの元ディレクター北折一先生に床矯正研究会でご講演を頂きました。ためしてガッテンは有名な「計るだけダイエット」があります。折れ線グラフが上げ下げしながらも徐々に下がっていくことでやる気を引き出し、それを分析する習慣をつけることで、効果がさらにあがるというものです。これを、床矯正に応用しました。

床矯正のモチベーションをあげるツールとしてお使いください。

※計るだけダイエットについては「計るだけダイエット NHK」で検索

使用方法

- ①目安として装置セットから約1ヶ月のタイミングでお渡しします。
- ②巻き方、進み具合をパナチェッカーで確認します。
- ③グラフの斜めの線上のペースですすめられるように、グラフの記入の仕方を説明します。
- ④モチベーションをあげる工夫として、患者さん自身に「がんばるぞ」等の抱負を書きこんでもらったり、プリクラシールを貼ったりします。
- ⑤定期的にチェックして、必要があれば進み具合を患者さんと相談する。

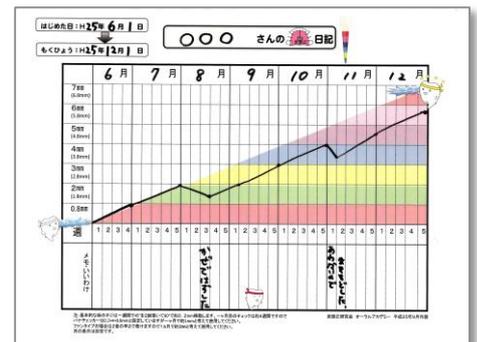

記入例)

・はじめの日、目標の日を設定する。

上段の月を記入する

※注意

1週間に90°進める場合以外は月の記入の調整を行う。例)ファンタイプの場合には2倍の早さで動く。

2マスを一ヶ月とする。45°を週1回と半分ペースで巻く場合には、1マス2ヶ月分を記入する。この場合、下段の週数には関係なくなる事を説明する。

・装置を巻き戻した、ネジを巻かなかった時には、その理由「メモ・いいわけ」欄に記入する。また、その場合の進み具合をパナチェッカーで測定し、記入する。